



iCare HOME2

iCare HOME2
Quick Guide

EN Quick Guide
FI Pikaohje
SV Snabbhandledning
DN Lynvejledning
NO Hurtigveiledning
EL Γρήγορος Οδηγός

Rychlý Průvodce

icare



Přečtěte si rychlého průvodce a zhlédněte video HOME2 uživatelské instrukce, před užíváním tonometru. Následujte instrukce krok po kroku.



Před užíváním tonometru si přečtěte bezpečnostní informace, v kapitole 1 uživatelské příručky.

Pokud potřebujete pomoc při používání iCare HOME2 tonometru, tak kontaktujte vašeho zdravotníka.



UPOZORNĚNÍ! Před prováděním měření aktualizujte čas na tonometru, na váš místní čas, manuálně z nastavení tonometru, nebo automaticky připojením tonometru k iCare PATIENT2 aplikaci nebo k iCare EXPORT softwaru.




Čeština


Krok

Strana


1	Vložení baterií	5
2	Vložení sondy	6
3	Zapnutí	8
4	Správná poloha na měření	9
5	Nastavení opěrek a umístění tonometru	10
6	Měření očního tlaku	12
7	Měření očního tlaku v leže	14
8	Řešení problémů	16
9	Vypnutí tonometru a zbavení se sondy	18

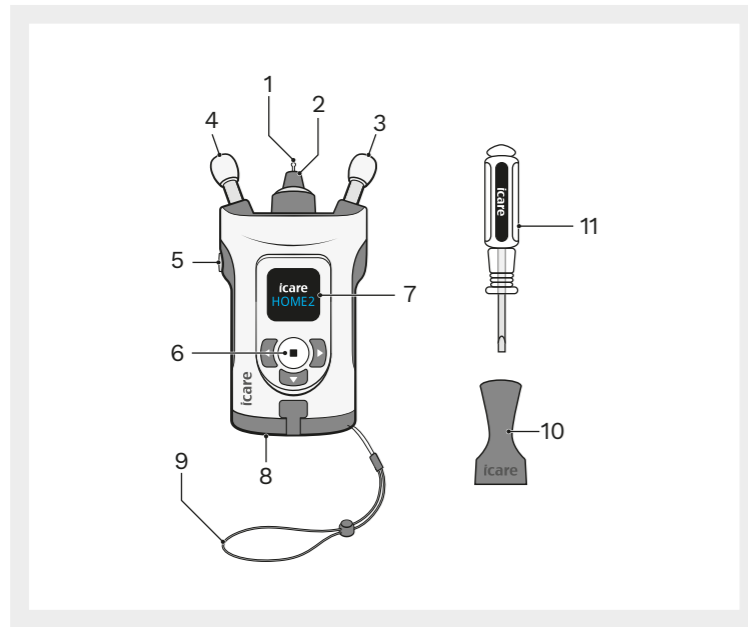


- 1 Sonda
- 2 Základna sondy
- 3 Opěrka tváře
- 4 Opěrka čela
- 5 Tlačítko měření
- 6 Tlačítko volby
- 7 Displej
- 8 Kryt baterií
- 9 Náramek na zápěstí
- 10 Aplikátor sondy
- 11 Šroubovák

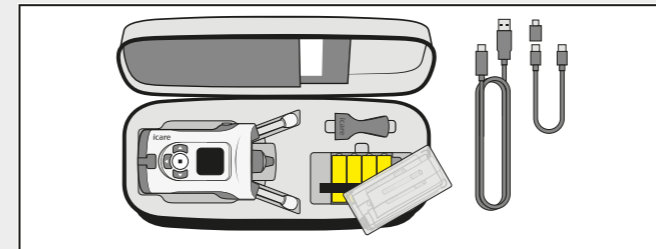


Baterie jsou v pouzdru tonometru pod krabičkou sond.

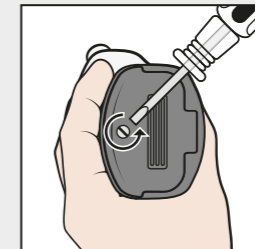


Otevřete kryt baterií šroubovákem.

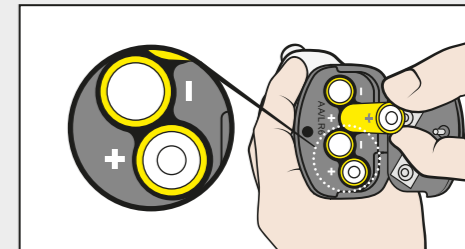


Vložte baterie a zavřete kryt.

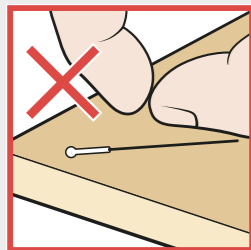


Sondu nepoužívejte pokud se dotkla vaší ruky, stolu nebo jiného nesterilního povrchu.

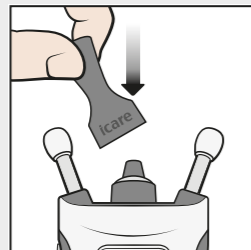

Dejte aplikátor sondy nad základnu sondy.

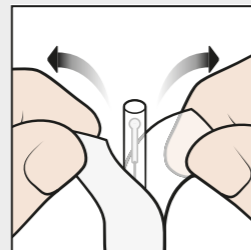


Otevřete balení.

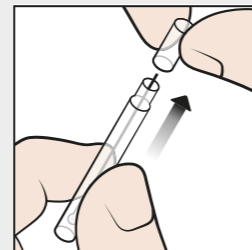


Odsraňte víčko.





VAROVÁNÍ! Pro zabránění kontaminace skladujte nepoužité sondy v jejich krabici. Nedotýkejte se holé sondy. Nepoužívejte sondu, pokud se dotkla nesterilního povrchu, jako třeba stolu nebo podlahy.

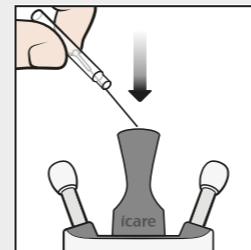

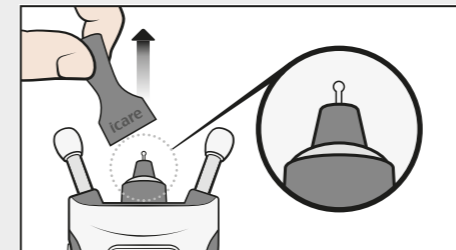


Upusťte sondu z pouzdra do aplikátoru sondy.


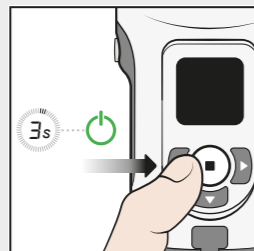
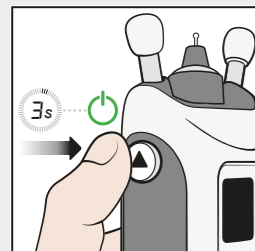


Odstraňte aplikátor sondy.



Stisk dolů  dokud neuslyšíte pípnutí. Text “Start” se objeví na displeji.

Případně stiskněte dolů  dokud neuslyšíte pípnutí. Stisk  znovu pro vstup do režimu měření. Text “Start” se zobrazí na displeji.

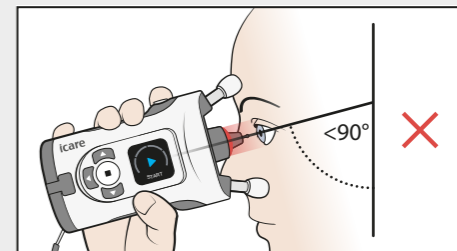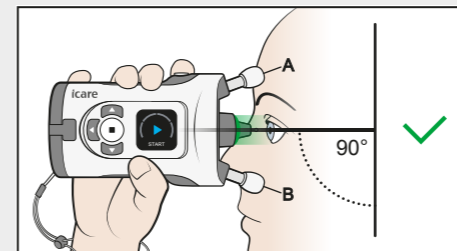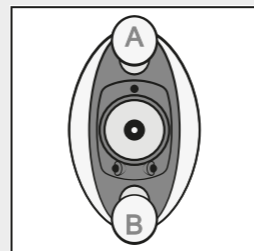


Opěrka čela A je na čele a opěrka tváře B je na tváři.


Dívejte se přímo dopředu s tonometrem v 90-stupňovém úhlu k vašemu obličejí. Sonda je asi 5 mm od vašeho oka a míří kolmo do středu vašeho oka.

Pokud v základně sondy uvidíte červené světlo, tak je tonometr nakloněn příliš dolů. Měli byste napřímit vaši hlavu.


Polohování tonometru je popsáno v následující sekci.

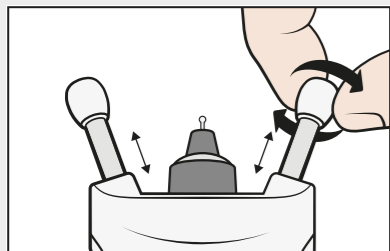

Před měřením nastavte opěrky čela a tváře na správnou délku. Začněte s opěrkami na maximální délce.

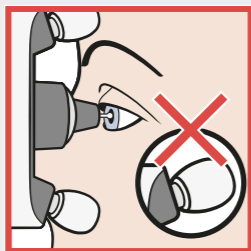


Zkracujte opěrky pouze po dvou kliknutích, abyste zabránili přílišnému přiblížení tonometru k vašemu oku.

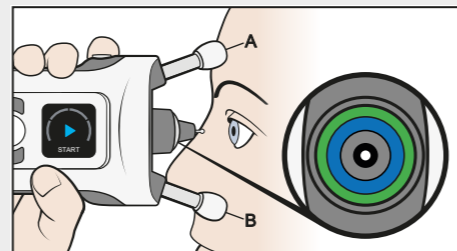


Držte tonometr u vašeho obličeje a dívejte se do základny sondy. Sonda míří kolmo do středu vašeho oka, když jsou modré a zelené kruhy v základně sondy symetrické.




VAROVÁNÍ! Pouze sonda se smí dotýkat oka. Nedotýkejte se vašeho oka jakoukoliv jinou částí tonometru.

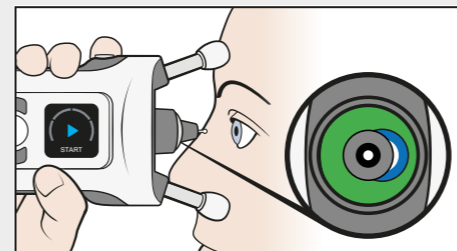


Pokud nejsou kruhy symetrické, tak sonda nemíří kolmo na střed vašeho oka. Upravte polohu tonometru.

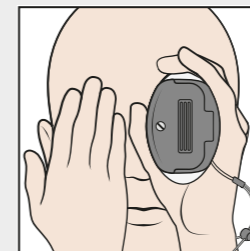


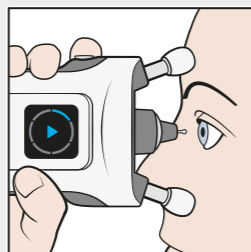
Mějte obě oči otevřené. Přikrytí druhého oka vám může pomoci vidět kruhy zřetelněji.

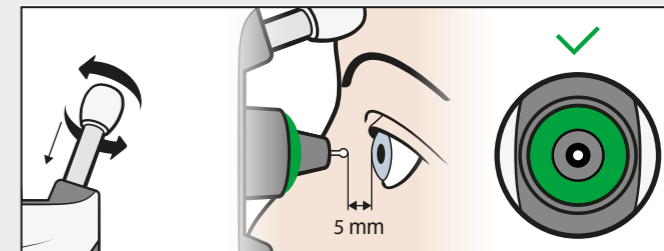


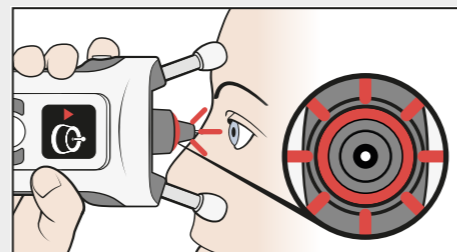
Zkracujte opěrky jejich otáčením doprava po dvou kliknutích, dokud nevidíte pouze symetrický zelený kruh. Tonometr je nyní ve správné vzdálenosti od vašeho oka.

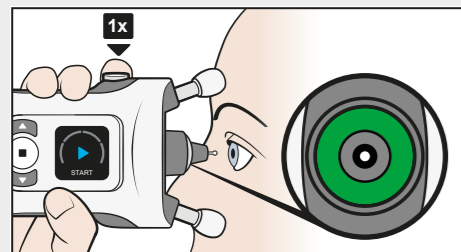


Zahajte měření když vidíte pouze symetrický zelený kruh. Stiskněte tlačítko měření  jednou. Sonda se lehce dotkne vašeho oka.




Úspěšné měření je oznámeno jedním pípnutím. Pokračujte v měření  - dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí a vypne se světlo v základně sondy.




Pokud základna sondy bliká červeně a slyšíte více pípnutí, tak to znamená, že měření nebylo úspěšné. Viz. **řešení problémů** na str. 16.

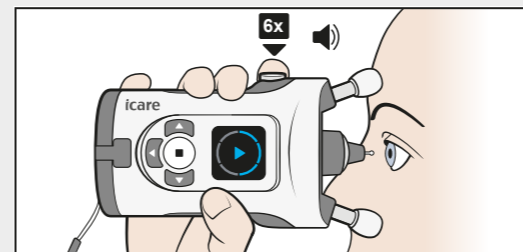



Série měření se skládá ze šesti měření.


Tip: Sérii měření také můžete provést stisknutím a podržením tlačítka měření  dokud nebude provedeno všech šest měření.

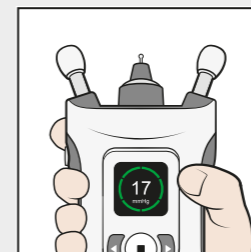


Po úspěšném provedení všech šesti měření se ozve delší pípnutí, světlo v základně sondy se vypne, a na displeji se zobrazí výsledek.

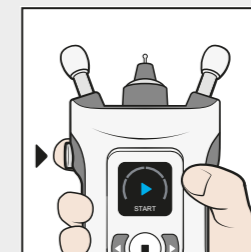


Stiskněte tlačítko měření  jednou a opakujte měření na vašem druhém oku.

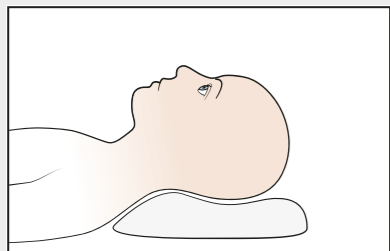


Před měřením si na chvíli lehněte.

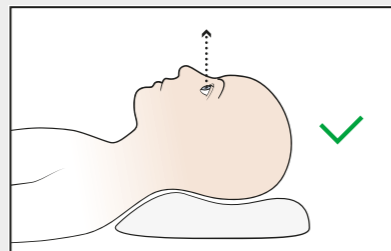


Zaujměte pohodlnou pozici na zádech s polštářem pod vaším krkem. Dívejte se přímo před sebe.

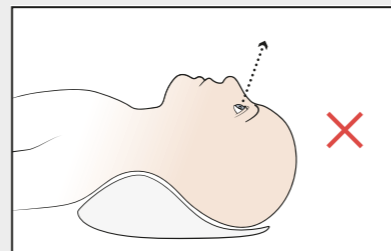

Nezaklánějte hlavu dozadu.

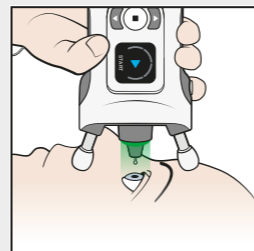


Držte tonometr na vašem obličejí pod úhlem 90 stupňů a proveďte měření dle předchozích instrukcí.

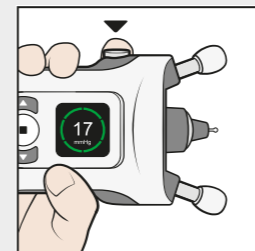


Po úspěšném měření stiskněte tlačítko měření jednou a opakujte měření na vašem druhém oku.




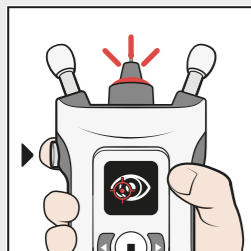


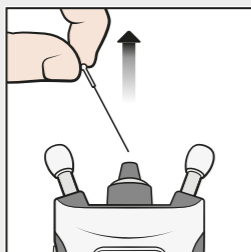
Pokud dojde k chybě, tak bude základna sondy blikat červeně. Na displeji se objeví zdroj chyby.

Podívejte se na displej, stiskněte tlačítko měření  jednou, proveďte potřebnou opravu, a opakujte měření.

Ikona	Zobrazený text	Zvuk	Problém	Řešení
	TOO FAR	3 dlouhé 	Sonda je příliš daleko od oka.	Stiskněte tlačítko měření  jednou na uznání chyby. Zkraťte opěrku čela a tváře.
	TOO NEAR	5 krátkých 	Sonda je příliš blízko k oku.	Stiskněte tlačítko měření  jednou na uznání chyby. Prodlužte opěrku čela a tváře.
	INCORRECT ALIGNMENT	2 krátké 	Sonda nebyla kolmá na rohovku nebo se dotkla očního víčka či řas.	Stiskněte tlačítko měření  jednou na uznání chyby. Nastavte tonometr tak, aby sonda mířila kolmo na střed vašeho oka. Držte oko řádně otevřené.
	REPEAT	2 krátké 	Došlo k problému s pohybem sondy.	Stiskněte tlačítko měření  jednou na uznání chyby. Opakujte měření.

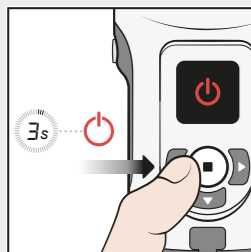


Stiskněte a držte tlačítko volby  dokud neuslyšíte 3 pípnutí a vypne se displej.



Vyjměte sondu a vložte zpět do pouzdra.



Vyhod'te sondu i s pouzdrém do smíšeného odpadu.

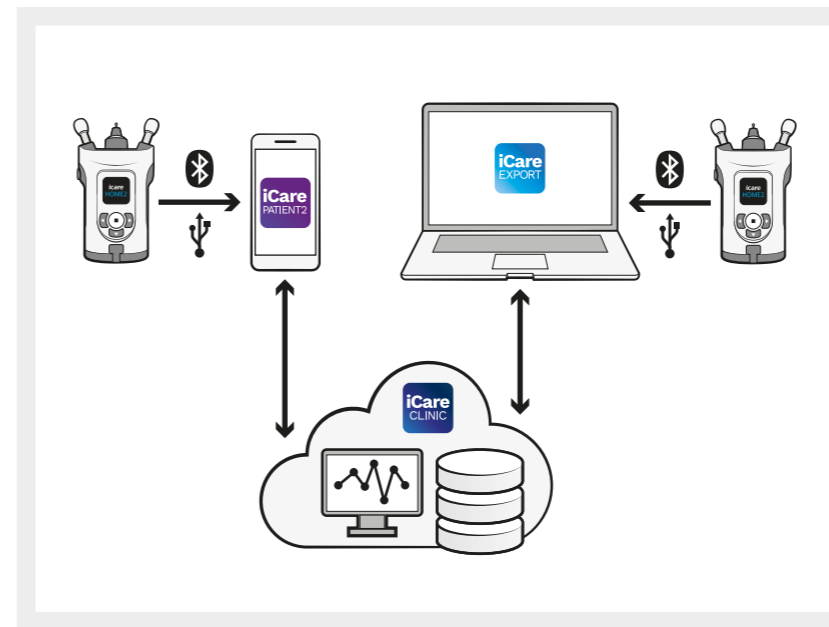

Nyní můžete přenést výsledky vašich měření na iCare CLINIC vašeho lékaře nebo na váš soukromý účet v iCare cloudu, pomocí iCare PATIENT2 aplikace na vašem mobilním zařízení nebo iCare EXPORT softwaru na vašem počítači.